



RolloGuard™

Monteringsmanual RolloGuard-hjul

För hjulen 5AAWR01 och 5AAWL01
med Ramadapterkit 5AAFA02



Version 2022.12

VIKTIGT!

UTFÖR INTE DENNA OPERATION UTAN ATT HA TILLRÄCKLIGT
MED MEKANISK KUNSKAP ELLER RÄTT VERKTYG.

SKADOR PÅ ROLLOGUARD-KOMPONENTERNA PÅ GRUND AV
FELAKTIGT UNDERHÅLL TÄCKS INTE AV GARANTIN.

RolloGuard AB
Verkstadsgatan 4
233 51 Svedala
SVERIGE

www.rolloguard.com

kontakt@rolloguard.com

Nödvändiga verktyg för att säkert montera RolloGuard-Hjul

För att säkert montera RolloGuard-hjulen behöver du lämpliga verktyg. Vi rekommenderar att du köper RolloGuard Verktygspaket (5AATK01) eller använder en liknande uppsättning verktyg som beskrivs nedan.



5 Nm momentnyckel med
13mm hylsa



6 mm insexnyckel



Liten spårskruvmejsel



FÖRSIKTIGHET

Den här produkten innehåller neodymmagneter. Neodymmagneter måste hanteras med försiktighet för att undvika personskador.


Hjärtstimulatorer

Neodymmagneter kan ha en farlig effekt på medicinska implantat som pacemakers. Se till att de skyddande inställningsinsatserna aldrig befinner sig i närheten av en sådan anordning.


Barn

Alla neodymmagneter bör alltid hållas borta från barn eftersom sväljning eller direktkontakt medför betydande hälsorisker.


Komponenter och material

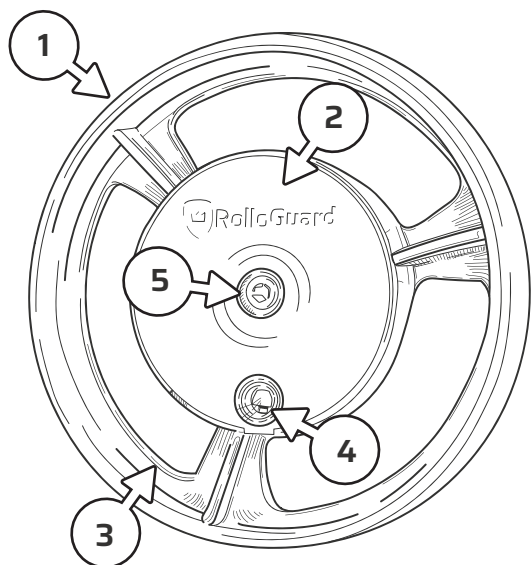

ID	Komponent	Material	Typ
1	Däck	Termoplast	TPE SHA 40 +/-2
2	Navkapsel	Plast	Polyamid - PA
3	Fälg	Plast	Polypropen - PP 15% glasfiber
4	Lock för finjusteringsplugg	Plast	Polypropylen - PP
5	Axel	Metall	Stål Varmförzinkad

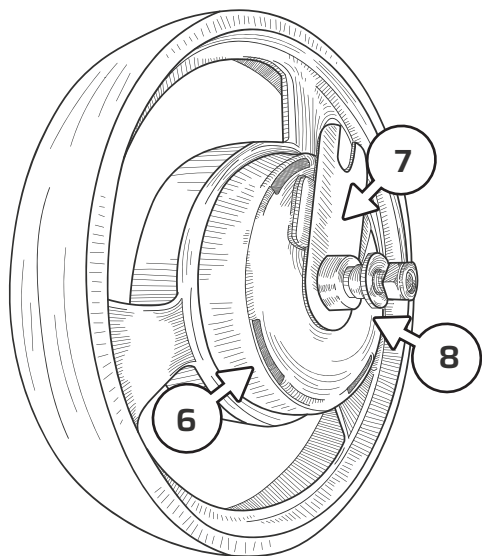


ID	Komponent	Material	Typ
6	Bromstrumma	Plast	Polyamid - PA6 50% glasfiber
7	Adapter	Metall	Magizink
8	Adapterkit	Metall/Plast	Stål varmförzinkad PA6

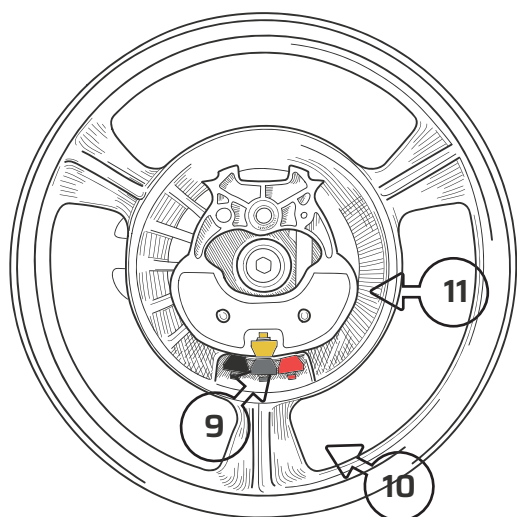


ID	Komponent	Material	Typ
9	Säkerhetsplugg	Polyoximetylen	POM-C Neodymmagneter
10	Riktningsanvisning	-	-
11	Bromsarm	Plast/Metall	Polyamid - PA6 30% glasfiber Zinc
-	Bromsbelägg STOPP	Gummi	EPDM
-	Länkarm	Plast	ABS

STEG 1: Förbered din rollator för uppgraderingen

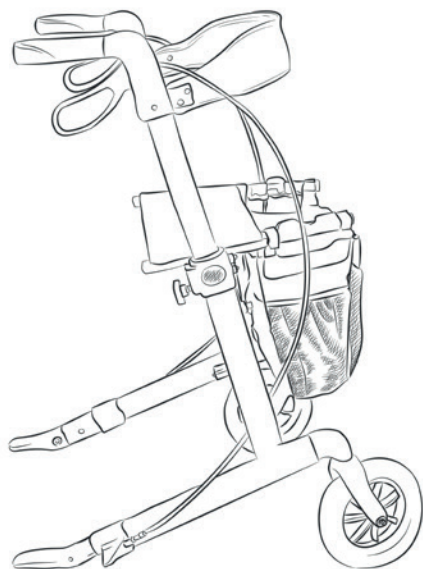

Efter att ha tagit bort originalhjulen i enlighet med Rollatorns bruksanvisning eller monteringsguide, placera därefter Rollatorn säkert på en jämn och ren yta, helst ett bord. Se till att Rollatorn inte kan röra sig.

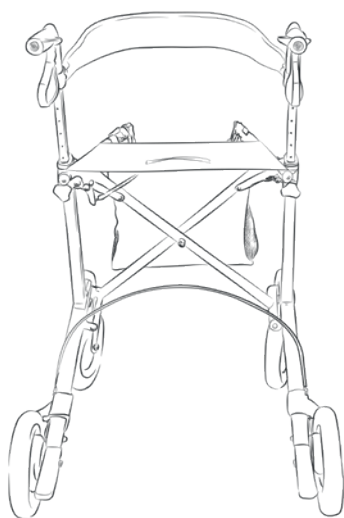

"Vänster" och "höger" anges genom att ställa sig bakom rullatorn.

Vänster

Höger



VIKTIGT

Hantera RolloGuard-Hjulen med försiktighet och se till att de inte blir repade eller tappas.

STEG 2: Verifiera bromsriktning

Se till att RolloGuard-hjulen är konfigurerade för att monteras på höger och vänster sida av Rollatorn. Detta indikeras av en markering på fälgen på RolloGuard-hjulet i kombination med placeringen av navkapseln på RolloGuard-hjulet enligt nedan.



Bild: riktningsmarkering (L/R)



Bild: Riktning vänster (L)

RolloGuard-hjulen säljs i par och är förkonfigurerade att monteras på höger och vänster sida av Rollatorn.

Dubbelkontrollera alltid den individuella konfigurationen av RolloGuard-hjulet innan det monteras. Placera den utskjutande plastspetsen på navkapseln i motsvarande spår och se till att den pekar mot rätt körriktningsindikator. Se till att navkapseln är ordentligt fastsatt innan du använder Rollatorn.

För mer information om konfigurering av RolloGuard-Hjulen, se RolloGuard-hjul Användarhandbok.



Picture: Right (R) side configuration



WARNING

WARNING

Om navkapseln placeras i fel spår kommer hjulet inte att bromsa i önskad riktning. Om navkapseln inte är korrekt placerad i ett spår kanske bromsen inte fungerar alls och kan orsaka en olycka.

STEG 3: Montera RolloGuard-hjulen

A: För RolloGuard-hjul med Ramadapterkit 5AAFA02.



STEG 4: Spänn hjulbulten

A: För RolloGuard-hjul med Ramadapterkit 5AAFA02.



5Nm momentnyckel med 13mm hylsa och 6mm insexnyckel

Använd en 5Nm momentnyckel med 13 mm bitshylsa på M8 nyloc-muttern och 6 mm insexnyckel på bulten. Dra åt hjulbulten tills ett högt "klikk" hörs.

Upprepa på det andra hjulet.



Använd inte mer än 5 Nm kraft eftersom det kan skada axeln och RolloGuard-hjulet och göra Rollatorn obrukbar.

Kontrollera att RolloGuard-hjulets funktionalitet motsvarar den önskade konfigurationen.